

Guida rapida

Sedia a rotelle elettrica Robooter – App mobile

[PDF Pagina 1]

Scansionare il codice QR per scaricare l'app mobile

Installare l'app mobile

Questa schermata viene visualizzata dopo la scansione.
Toccare INSTALLA per installare l'app mobile.

Collegare il dispositivo

Toccare CERCA per cercare il dispositivo.
Una volta completata questa operazione, l'app mobile inizia a cercare il dispositivo.

Toccare il dispositivo **DF:85:EC:73:15:05**  visualizzato per accoppiare l'app mobile con il dispositivo.

Connessione riuscita

Questa schermata indica una connessione riuscita.
Toccare CONFERMA per accedere alla schermata di stato della sedia a rotelle elettrica.

Nota:

Quando la sedia a rotelle elettrica è in modalità blocco, viene visualizzata questa interfaccia. Dopo aver acceso la sedia a rotelle elettrica, la modalità blocco si attiva automaticamente. Utilizzare l'app mobile solo dopo aver sbloccato la sedia a rotelle elettrica.

Toccare  **Power off** SPEGNI per spegnere il dispositivo.

Toccare  **DISCONNETTI BLUETOOTH** per disconnettere la connessione Bluetooth.

Toccare **REGOLAZIONE VELOCITÀ** per regolare la velocità (5 livelli disponibili).

[PDF Pagina 2]

Regolazione della modalità

Toccare MODALITÀ NORMALE nella schermata di stato per passare dalla modalità potenziata alla modalità normale.

Note sull'utilizzo

Si consiglia di attivare questa modalità solo temporaneamente, per sbloccarsi da una situazione di stallo o per superare terreni difficili che richiedono molta potenza. Tornare immediatamente alla modalità normale dopo l'uso.

Modalità telecomando

Toccare TELECOMANDO nella schermata di stato per accedere alla modalità telecomando. Scorrere verso l'alto per avanzare, verso il basso per indietreggiare, verso sinistra per girare a sinistra e verso destra per girare a destra.

Impostazioni



Toccare l'icona dell'ingranaggio in alto a destra per accedere alle impostazioni.

Informazioni sulla batteria

Toccare INFORMAZIONI BATTERIA nelle impostazioni per visualizzare il livello di carica e lo stato della batteria.

Versione attuale

Sotto VERSIONE ATTUALE viene visualizzata la versione software attualmente installata. Toccare VERIFICA AGGIORNAMENTI per cercare aggiornamenti del software.

Requisiti minimi di sistema

- Android versione 6.0 o superiore
- iOS versione 9.0 o superiore
- Bluetooth versione 4.0 o superiore
- RAM minima: 1 GB
- Spazio di archiviazione richiesto: 50 MB