


Attends® Cover-Dri



Anlegehinweise Attends Cover-Dri


Vorbereitung

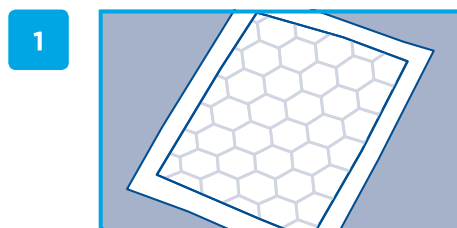

1

Breiten Sie das Produkt aus und achten Sie darauf, dass die wasserdichte Seite unten liegt. Die weiche, weiße Seite muss oben sein.


Anlegen

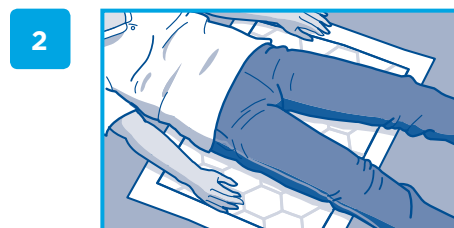

2


Platzieren Sie die Person auf der Krankenunterlage.

Produktwechsel

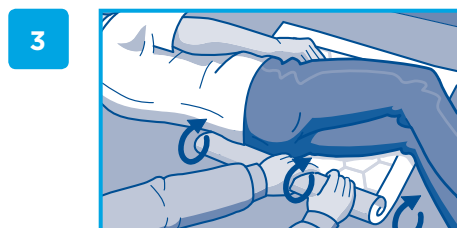


3

Drehen Sie die Person in die Seitenlage. Rollen Sie die gebrauchte Attends Cover-Dri Krankenunterlage zur Person hin auf.

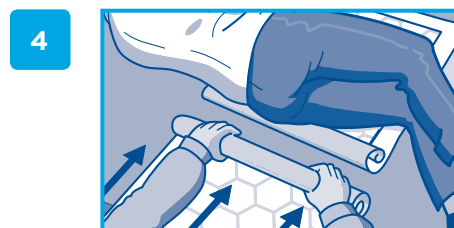


4

Rollen Sie die neue Attends Cover-Dri bis zum Rücken des Patienten auf.

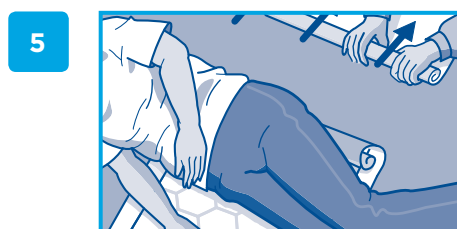

5

Drehen Sie die Person von der gebrauchten auf die frische Cover-Dri Krankenunterlage.

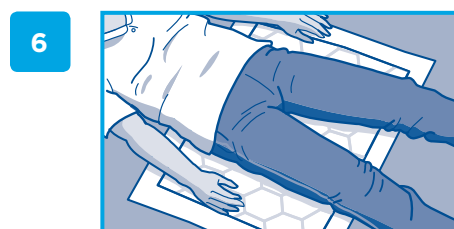

6

Drehen Sie die Person in ihre ursprüngliche Lage und ziehen Sie die Attends Cover-Dri noch einmal glatt.

Hinweise und Tipps

Produktauswahl

- Wählen Sie die passende Produktgröße und Saugstärke.

Auslaufschutz

- Prüfen Sie, ob Sie die richtige Größe und die richtige Saugstärke Ihrer Krankenunterlage verwenden.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt über den Restmüll.
- Werfen Sie das Produkt nicht in die Toilette.



Die Hautfreundlichkeit von Attends Cover-Dri ist von proDERM, Institut für Angewandte Dermatologische Forschung, bestätigt worden.

www.attends.de www.attends.at www.attends.ch