

FORMADES

SCHNELLEDISINFEKTION



schnelle Wirksamkeit

begrenzt viruzid PLUS



PLUS PURE

Alkoholische Schnelldesinfektion

Anwendung

Zur Wischdesinfektion ein geeignetes Tuch mit der Desinfektionslösung sehr gut benetzen und die Flächen abwischen, bzw. die Lösung direkt auf die Fläche geben und danach wischen. Alle zu desinfizierenden Flächen müssen vollständig feucht und benetzt sein. Das Präparat gemäß angegebener Einwirkzeiten einwirken lassen. Auch zum Tränken von kompatiblen und mit der Wischdesinfektion geprüften Tücherrollen geeignet. Es ist in diesem Anwendungsfall die geforderte Tränkmenge des jeweiligen Tuchmaterials zu beachten. Sehr gute Materialverträglichkeit auch gegenüber sonst alkoholunverträglichen Materialien.

- schnelle Wirksamkeit gegen Bakterien, behüllte und unbehüllte Viren
- gebrauchsfertige Lösung
- aldehydfrei
- auf allen alkoholbeständigen Oberflächen anzuwenden
- Medizinprodukt (D,CH)
- HACCP- konform

Einsatzbereich

Gemäß MPG (D, CH): Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten im medizinischen Bereich.

Gemäß Biozid-Verordnung (D): Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion zur Desinfektion von kleineren Flächen.

Geeignet für den medizinischen Bereich ((zahn)ärztliche Praxen, Kliniken, Altenheime, Pflege- und Rettungsdienste) und die Bereiche Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid	konz. 1 Min.	EN 13697, EN 16615 hohe Belastung, VAH*
Tuberkulozid (M. terrae) und Mycobakterien (M. avium)	konz. 1 Min.	EN 14348 hohe Belastung, VAH*
Begrenzt viruzid (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV)	konz. 1 Min.	EN 14476 hohe Belastung
Begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV) und Noro-, Adeno- und Rota-Viren	konz. 1 Min.	EN 14476 niedrige Belastung
Polyoma SV 40, RKI/DVV	konz. 1 Min.	DVV/RKI-Leitlinie

*in der VAH in der 5 Min. Spalte gelistet.

Wirkstoffe

100 g enthalten: 20,0 g 1-Propanol; 5,0 g 2-Propanol

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP):
Gefahr; GHS02, GHS07

Hinweise

FORMADES PLUS PURE soll nicht auf alkoholempfindlichen Flächen wie Acryl- und Flexiglas angewendet werden.

Haltbarkeit geschlossen: siehe Etikett

Gebinde	Inhalt	VE	Art.Nr.	PZN
Keulenflasche	1 Liter	8 (inkl. 2 Sprühköpfe)	65773	17999568
Kanister	5 Liter	1	65771	16928974
Euroflasche	1 Liter	6	65770	16928968

BAuA-Reg. Nr. N-82462

pH 0 2 4 6 8 10 12 14 **CE 0124 MD**

Stand 08/2023

Alle Angaben unserer Produktdatenblätter entsprechen unserem besten Wissen.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.
Weitere Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.216.197) am 12.08.2026 um 11:41 Uhr · sanaservices.ch

Vertrieb durch:

D: unizell Medicare GmbH
Pohnsdorfer Str. 3
DE-23611 Bad Schwartau
Telefon: 0451 - 39 89 00
Telefax: 0451 - 39 39 93
E-mail: info@unizell.de

CH: Praximedico AG
Bleichelstraße 22
CH-9055 Bühler AR



PRISMAN GmbH
Otto-Hahn-Ring 6-18
DE-64653 Lorsch
Tel.: +49 (0) 6251 866980-0



PRISMAN Pharma International AG
Am Stalden 16 ·
CH-4622 Egerkingen