

# FORMADES

## SCHNELLEDISINFEKTION



schnelle Wirksamkeit

begrenzt viruzid PLUS



## PLUS PURE

### Alkoholische Schnelldesinfektion

#### Anwendung

Zur Wischdesinfektion ein geeignetes Tuch mit der Desinfektionslösung sehr gut benetzen und die Flächen abwischen, bzw. die Lösung direkt auf die Fläche geben und danach wischen. Alle zu desinfizierenden Flächen müssen vollständig feucht und benetzt sein. Das Präparat gemäß angegebener Einwirkzeiten einwirken lassen. Auch zum Tränken von kompatiblen und mit der Wischdesinfektion geprüften Tücherrollen geeignet. Es ist in diesem Anwendungsfall die geforderte Tränkmenge des jeweiligen Tuchmaterials zu beachten. Sehr gute Materialverträglichkeit auch gegenüber sonst alkoholunverträglichen Materialien.

- schnelle Wirksamkeit gegen Bakterien, behüllte und unbehüllte Viren
- gebrauchsfertige Lösung
- aldehydfrei
- auf allen alkoholbeständigen Oberflächen anzuwenden
- Medizinprodukt (D,CH)
- HACCP- konform

#### Einsatzbereich

Gemäß MPG (D, CH): Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten im medizinischen Bereich.

Gemäß Biozid-Verordnung (D): Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion zur Desinfektion von kleineren Flächen.

Geeignet für den medizinischen Bereich ((zahn)ärztliche Praxen, Kliniken, Altenheime, Pflege- und Rettungsdienste) und die Bereiche Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen.

| Anwendungsgebiet/Wirksamkeit                                                                   | Konzentration/Einwirkzeit | Anmerkung                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid                                                             | konz. 1 Min.              | EN 13697, EN 16615 hohe Belastung, VAH* |
| Tuberkulozid (M. terrae) und Mycobakterien (M. avium)                                          | konz. 1 Min.              | EN 14348 hohe Belastung, VAH*           |
| Begrenzt viruzid (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV)                                       | konz. 1 Min.              | EN 14476 hohe Belastung                 |
| Begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV) und Noro-, Adeno- und Rota-Viren | konz. 1 Min.              | EN 14476 niedrige Belastung             |
| Polyoma SV 40, RKI/DVV                                                                         | konz. 1 Min.              | DVV/RKI-Leitlinie                       |

\*in der VAH in der 5 Min. Spalte gelistet.

#### Wirkstoffe

100 g enthalten: 20,0 g 1-Propanol; 5,0 g 2-Propanol

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

**Kennzeichnung** gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP):  
Gefahr; GHS02, GHS07

#### Hinweise

FORMADES PLUS PURE soll nicht auf alkoholempfindlichen Flächen wie Acryl- und Flexiglas angewendet werden.

Haltbarkeit geschlossen: siehe Etikett

| Gebinde       | Inhalt  | VE                     | Art.Nr. | PZN      |
|---------------|---------|------------------------|---------|----------|
| Keulenflasche | 1 Liter | 8 (inkl. 2 Sprühköpfe) | 65773   | 17999568 |
| Kanister      | 5 Liter | 1                      | 65771   | 16928974 |
| Euroflasche   | 1 Liter | 6                      | 65770   | 16928968 |

BAuA-Reg. Nr. N-82462

pH 0 2 4 6 8 10 12 14 **CE 0124 MD**

Stand 08/2023

Alle Angaben unserer Produktdatenblätter entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.  
Weitere Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.216.240) am 20.08.2026 um 13:08 Uhr · sanaservices.ch

Vertrieb durch:

**D:** unizell Medicare GmbH  
Pohnsdorfer Str. 3  
DE-23611 Bad Schwartau  
Telefon: 0451 - 39 89 00  
Telefax: 0451 - 39 39 93  
E-mail: info@unizell.de

**CH:** Praximedico AG  
Bleichelstraße 22  
CH-9055 Bühler AR



**PRISMAN GmbH**  
Otto-Hahn-Ring 6-18  
DE-64653 Lorsch  
Tel.: +49 (0) 6251 866980-0



**PRISMAN Pharma International AG**  
Am Stalden 16 ·  
CH-4622 Egerkingen