



Istruzioni per l'uso

Nome

Traversa per incontinenza riutilizzabile

Modello

40x50cm, 45x45cm, 45x60cm, 50x50cm, 50x60cm, 51x56cm, 53x56cm, 45x61cm, 75x90cm, 76x86cm, 80x90cm, 85x90cm, 85x135cm, 86x91cm, 86x132cm, 86x138cm, 86x96cm, 90x132cm, 90x140cm, 90x120cm, 90x150cm, 90x180cm, 91x91cm, 91x138cm, 91x142cm, 91x152cm, 91x182cm, 100x140cm, 110x130cm, 111x132cm. Tutte le misure possono essere prodotte con o senza alette/tasche laterali.

Descrizione del dispositivo

Protezione tessile multistrato in materiale assorbente [ad es. poliestere + poliestere non tessuto con viscosa + poliestere con PU/PVC, o poliestere + poliestere non tessuto con viscosa + poliestere con PU/PVC + tessuto cotone/poliestere, o poliestere + imbottitura + poliestere non tessuto con viscosa + poliestere con PU]. La traversa viene posizionata su una superficie (ad es. materasso, sedia, divano) e sotto il paziente per assorbire fluidi corporei derivanti da procedure chirurgiche, parto e/o incontinenza. Il prodotto non contiene agenti antimicrobici ed è destinato all'uso in strutture sanitarie e a domicilio.

Destinazione d'uso

Questo prodotto è destinato all'uso in abitazioni private, ospedali e case di cura per proteggere le persone anziane e i pazienti incontinenti dall'infiltrazione di urina o altri fluidi corporei in letti, divani, sedie o altre superfici, e per proteggere la superficie sottostante dall'umidità.

Aspetto e componenti

Realizzato in tessuto a maglia catena, poliestere non tessuto, poliestere di imbottitura e composito TPU/PVC o cucito. Fornito non sterile.

Modalità d'uso

1. Leggere attentamente l'etichetta e le istruzioni per l'uso prima dell'utilizzo.
2. Rimuovere l'imballaggio. Non utilizzare il prodotto se l'imballaggio è danneggiato o il prodotto è scaduto.

3. Posizionare la traversa per incontinenza sul letto, sulla sedia, sul divano o su altre superfici da proteggere e isolare.

Precauzioni e avvertenze

1. Questo prodotto è riutilizzabile. Si prega di sostituirlo tempestivamente con un prodotto pulito.
2. Questo prodotto non è sterilizzato e non è fornito in modo asettico.
3. Non utilizzare con coperte elettriche e altri apparecchi riscaldanti.
4. Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone anziane per evitare l'ingestione accidentale.

Controindicazioni

Non utilizzare in caso di allergia al tessuto a maglia catena.

Conservazione

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.

Istruzioni per il lavaggio

1. Lavare senza ammorbidente prima del primo utilizzo.
2. Temperatura di lavaggio < 95°C.
3. Asciugare in asciugatrice a bassa temperatura.
4. Non lavare a secco / Non candeggiare / Non stirare / Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia.
5. Non asciugare a vapore né a pressa.

Durata di conservazione

5 anni

Smaltimento

Smaltire il prodotto in conformità alle normative locali.

Etichette, simboli di imballaggio

Simbolo	Spiegazione	Simbolo	Spiegazione
	Marcatura CE		Dispositivo medico
	Nome e indirizzo del fabbricante		Rappresentante autorizzato nell'UE

	Data di fabbricazione		Utilizzabile fino a (data di scadenza)
	Codice lotto		Non riutilizzare / Monouso
	Avvertenze e precauzioni		Non sterile
	Consultare le istruzioni per l'uso		Non utilizzare se la confezione è danneggiata
	Identificazione unica del dispositivo		Paese di fabbricazione
	Importatore		Distributore
	Numero di modello		Mandatario svizzero

Fabbricante



Azienda: Changzhou Newrise Medical & Hygiene Products Co., Ltd
Indirizzo: No. 39 Chuangye Road, Zhulin Town, Jintan District,
Changzhou City, Jiangsu, China 213241

Rappresentante autorizzato nell'UE (EU REP)



Azienda: SUNGO Europe B.V.
Indirizzo: Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands

Mandatario svizzero (CH REP)



Azienda: Sana Swiss Services AG
Indirizzo: Niedermattstrasse 8c, 4528 Zuchwil, Switzerland