

# Kurzanleitung

## Robooter Elektrorollstuhl – Mobile App

[PDF Seite 1]

**Scannen Sie den QR-Code, um die Robooter-App herunterzuladen.**

### Mobile App installieren

Nach dem Scannen wird der Installationsbildschirm angezeigt. Tippen Sie auf « LADEN », um die mobile App zu installieren.

### Gerät verbinden

Tippen Sie auf « KLINKE, UM ZU SUCHEN », um nach dem Gerät zu suchen.

Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, beginnt die mobile App mit der Suche nach dem Gerät.

Tippen Sie auf die angezeigte Bluetooth-Adresse **DF:85:EC:73:15:05** , um die mobile App mit dem Gerät zu koppeln.

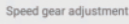
### Erfolgreiche Verbindung

Dieser Bildschirm zeigt eine erfolgreiche Verbindung an.

Tippen Sie auf « VERSTANDEN », um zum Statusbildschirm des Elektrorollstuhls zu gelangen.

### Hinweis:

Wenn sich der Elektrorollstuhl im Sperrmodus befindet, wird diese Oberfläche angezeigt. Nach dem Einschalten wird der Sperrmodus automatisch aktiviert. Verwenden Sie die mobile App erst, nachdem Sie den Elektrorollstuhl entsperrt haben.

- Tippen Sie auf  « AUSSCHALTEN », um das Gerät auszuschalten.
- Tippen Sie auf  « BLUETOOTH VERBINDUNG TRENNEN », um die Bluetooth-Verbindung zu trennen.
- Tippen Sie auf « GESCHWINDIGKEIT EINSTELLEN » , um die Gerätegeschwindigkeit anzupassen (einstellbare Geschwindigkeit in 5 Stufen).

[PDF Seite 2]

### Modus-Anpassung

Tippen Sie im Statusbildschirm auf  « NORMALMODUS », um zwischen erweitertem Modus und normalem Modus zu wechseln.

### **Hinweise zur Verwendung:**

Es wird empfohlen, diesen Modus nur vorübergehend zu aktivieren, um sich aus einer Blockade zu lösen oder schwierigen Geländesituationen zu überwinden, die viel Leistung erfordern.

Bitte wechseln Sie nach der Verwendung sofort in den normalen Modus zurück.

### **Fernsteuerungsmodus**

Tippen Sie im Statusbildschirm auf « FERNBEDIENUNG », um den Fernsteuerungsmodus aufzurufen. Wischen Sie auf dem Steuerkreis nach oben zum Vorwärtsfahren, nach unten zum Rückwärtsfahren, nach links zum Linksabbiegen und nach rechts zum Rechtsabbiegen.

### **Einstellungen**

Tippen Sie auf das « EINSTELLUNGEN»  oben rechts, um zum Einstellungsbildschirm zu gelangen.

### **Batterieinformationen**

Tippen Sie auf « BATTERIEINFORMATIONEN », um Ladestand und Batteriestatus anzuzeigen.

### **Aktuelle Version**

Unter « AKTUELLE VERSION » wird die aktuelle installierte Softwareversion angezeigt. Mit « NACH UPDATES SUCHEN » sucht man nach Aktualisierungen/Upgrades der Software.

### **Mindestsystemanforderungen**

- Android-Version 6.0 oder höher
- iOS-Version 9.0 oder höher
- Bluetooth-Version 4.0 oder höher
- Arbeitsspeicher / RAM mindestens: 1 GB
- Erforderlicher Speicherplatz: 50 MB