


Attends® Cover-Dri



Anlegehinweise Attends Cover-Dri

Vorbereitung


1

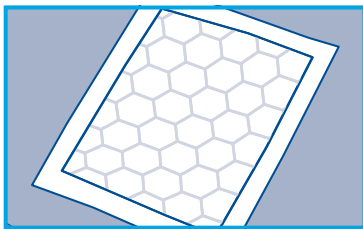

Breiten Sie das Produkt aus und achten Sie darauf, dass die wasserdichte Seite unten liegt. Die weiche, weiße Seite muss oben sein.

Anlegen


2

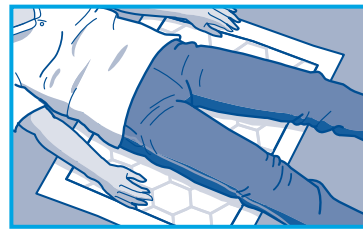

Platzieren Sie die Person auf der Krankenunterlage.


Produktwechsel

3

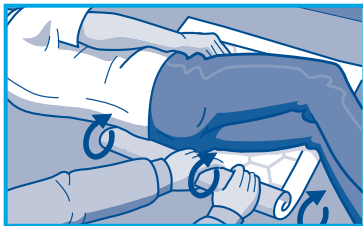

Drehen Sie die Person in die Seitenlage. Rollen Sie die gebrauchte Attends Cover-Dri Krankenunterlage zur Person hin auf.

4

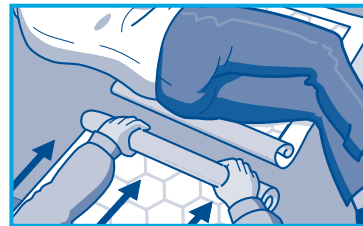


Rollen Sie die neue Attends Cover-Dri bis zum Rücken des Patienten auf.

5



Drehen Sie die Person von der gebrauchten auf die frische Cover-Dri Krankenunterlage.

6

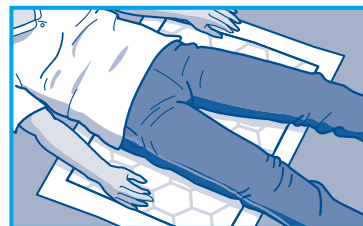

Drehen Sie die Person in ihre ursprüngliche Lage und ziehen Sie die Attends Cover-Dri noch einmal glatt.

Hinweise und Tipps

Produktauswahl

- Wählen Sie die passende Produktgröße und Saugstärke.

Auslaufschutz

- Prüfen Sie, ob Sie die richtige Größe und die richtige Saugstärke Ihrer Krankenunterlage verwenden.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt über den Restmüll.
- Werfen Sie das Produkt nicht in die Toilette.



Die Hautfreundlichkeit von Attends Cover-Dri ist von proDERM, Institut für Angewandte Dermatologische Forschung, bestätigt worden.

www.attends.de www.attends.at www.attends.ch