

# FORMADES

## HÄNDEDESINFEKTION



HACCP-konform

VAH\*

begrenzt viruzid

## DERM GEL

### Alkoholische Händedesinfektion

- gebrauchsfertige alkoholische Lösung
- frei von Duft- und Farbstoffen
- mit Rückfetter
- praktische und sparsame Anwendung ohne „zu Tropfen“

#### Einsatzbereich

Zur hygienischen Händedesinfektion in medizinischen Einrichtungen, in Schulen, Kindergärten und Heimen und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentlichen Einrichtungen

#### Anwendung

Für die hygienische Händedesinfektion werden die Hände mit dem Gel 30 Sekunden eingerieben. Es ist darauf zu achten, dass die Haut während der gesamten Einreibzeit feucht gehalten wird.

| Anwendungsgebiet/Wirksamkeit                             | Konzentration/Einwirkzeit | Anmerkung                            |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid                    | konz. 30 Sek.*            | EN 1500                              |
| Tuberkulozid (M. terrae)                                 | konz. 30 Sek.*            | EN 14348 hohe und niedrige Belastung |
| Begrenzt viruzid (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV) | konz. 15 Sek.**           | DVV-/RKI-Leitlinie                   |
| Rotaviren                                                | konz. 30 Sek.*            | EN 14476 ohne Belastung              |
| Noroviren (MNV)                                          | konz. 30 Sek.*            | EN 14476 niedrige Belastung          |

\* Die Hände während der gesamten Applikationszeit durch das konzentrierte Präparat feucht halten.

\*\* Für die hygienische Händedesinfektion ist eine Einwirkzeit von mindestens 30 Sekunden einzuhalten.

#### Wirkstoffe

100 g enthalten:  
67,0 g 2-Propanol; 3,08 g Ethanol

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden.**

**Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

**Kennzeichnung** gemäß EG-Verordnung 1272/2008:  
Gefahr; GHS02, GHS07

#### Hinweise

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
Sicherheitsdatenblatt beachten.

Haltbarkeit geschlossen: siehe Etikett  
Haltbarkeit offenes Spendersystem: 6 Monate

\*beim VAH angemeldet (Stand 04/2021)

| Gebinde        | Inhalt | VE | Art.Nr. | PZN      |
|----------------|--------|----|---------|----------|
| Kittelflasche  | 150 ml | 20 | 65678   | 16928767 |
| Spenderflasche | 500 ml | 10 | 65679   | 16928773 |

BAuA-Reg. Nr. N-97148

pH 0 2 4 6 8 10 12 14

Stand 04/2021

Alle Angaben unserer Produktdatenblätter entsprechen unserem besten Wissen.  
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Heruntergeladen von: [www.unizell.de](http://www.unizell.de) (12.06.2021) oder [info@unizell.de](mailto:info@unizell.de) (12.06.2021) oder [www.unizell.de](http://www.unizell.de) (12.06.2021) oder [info@unizell.de](mailto:info@unizell.de) (12.06.2021)

Vertrieb durch:  
unizell Medicare GmbH  
Pohnsdorfer Str. 3  
23611 Bad Schwartau

Telefon: 0451 - 39 89 00  
Telefax: 0451 - 39 39 93  
E-mail: [info@unizell.de](mailto:info@unizell.de)

Hersteller:  
DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA  
Tausnusstraße 19 · 80807 München  
Tel. +49 89 3506080

unizell