

Guida rapida

Sedia a rotelle elettrica Robooter – App mobile

[PDF Pagina 1]


Scansionare il codice QR per scaricare l'app mobile

Installare l'app mobile

Questa schermata viene visualizzata dopo la scansione.
Toccare **INSTALLA** per installare l'app mobile.

Collegare il dispositivo

Toccare **CERCA** per cercare il dispositivo.
Una volta completata questa operazione, l'app mobile inizia a cercare il dispositivo.


Toccare il dispositivo **DF:85:EC:73:15:05**  visualizzato per accoppiare l'app mobile con il dispositivo.

Connessione riuscita

Questa schermata indica una connessione riuscita.
Toccare **CONFERMA** per accedere alla schermata di stato della sedia a rotelle elettrica.

Nota:

Quando la sedia a rotelle elettrica è in modalità blocco, viene visualizzata questa interfaccia. Dopo aver acceso la sedia a rotelle elettrica, la modalità blocco si attiva automaticamente. Utilizzare l'app mobile solo dopo aver sbloccato la sedia a rotelle elettrica.

Toccare  **Power off** **SPEGNI** per spegnere il dispositivo.

Toccare  **DISCONNETTI BLUETOOTH** per disconnettere la connessione Bluetooth.

Toccare **REGOLAZIONE VELOCITÀ** per regolare la velocità (5 livelli disponibili).

[PDF Pagina 2]

Regolazione della modalità

Toccare **MODALITÀ NORMALE** nella schermata di stato per passare dalla modalità potenziata alla modalità normale.

Note sull'utilizzo

Si consiglia di attivare questa modalità solo temporaneamente, per sbloccarsi da una situazione di stallo o per superare terreni difficili che richiedono molta potenza. Tornare immediatamente alla modalità normale dopo l'uso.

Modalità telecomando

Toccare **TELECOMANDO** nella schermata di stato per accedere alla modalità telecomando. Scorrere verso l'alto per avanzare, verso il basso per indietreggiare, verso sinistra per girare a sinistra e verso destra per girare a destra.

Impostazioni



Toccare l'icona dell'ingranaggio in alto a destra per accedere alle impostazioni.

Informazioni sulla batteria

Toccare INFORMAZIONI BATTERIA nelle impostazioni per visualizzare il livello di carica e lo stato della batteria.

Versione attuale

Sotto VERSIONE ATTUALE viene visualizzata la versione software attualmente installata. Toccare VERIFICA AGGIORNAMENTI per cercare aggiornamenti del software.

Requisiti minimi di sistema

- Android versione 6.0 o superiore
- iOS versione 9.0 o superiore
- Bluetooth versione 4.0 o superiore
- RAM minima: 1 GB
- Spazio di archiviazione richiesto: 50 MB