


Entfalten & Falten

✓ Entfalten

1. Korb vollständig leeren
2. Faltschalter drücken
3. Rückenlehne hochziehen, bis sie einrastet

i Falten

1. Faltschalter drücken
2. Rückenlehne nach vorne schieben

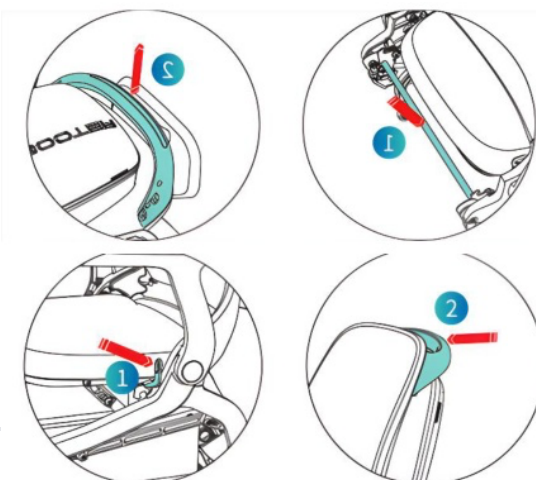

Einschalten & Steuerung

Ein-/Ausschalten


Netzschalter 3 Sekunden drücken zum Ein- oder Ausschalten

Fahrzeugverriegelung

Netzschalter kurz drücken für Verriegelung ein/aus

Funktionen

- **Gang ↑/↓**: Geschwindigkeit 1–5
- **Hupe**: Kurz drücken
- **SOS**: 3 Sekunden drücken
- **Fn**: Anfängermodus (Gang 1–2)

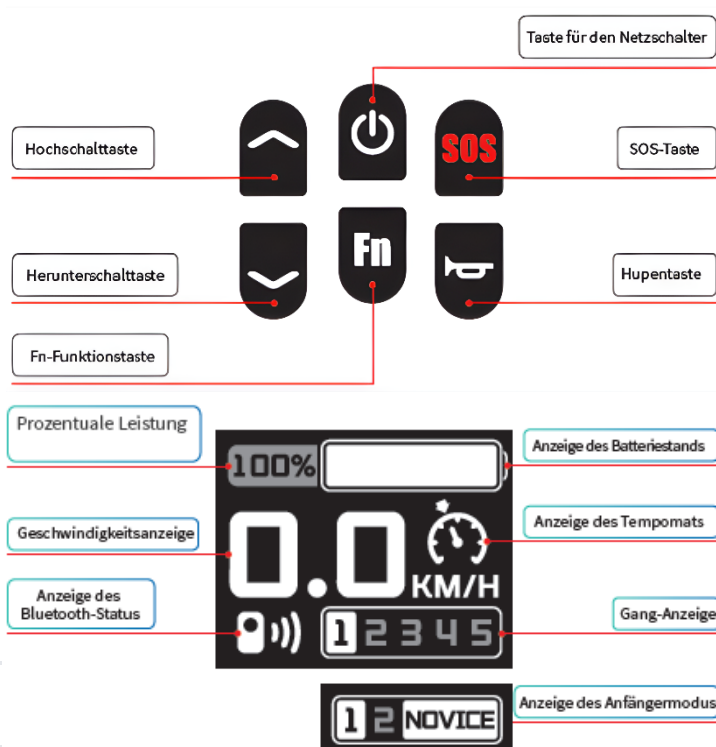


Armlehnenlampe & USB

Beleuchtung

Lampe: Via Touch-Bedienung einschaltbar

Lademöglichkeiten

USB-A & USB-C zum Laden Ihrer Geräte

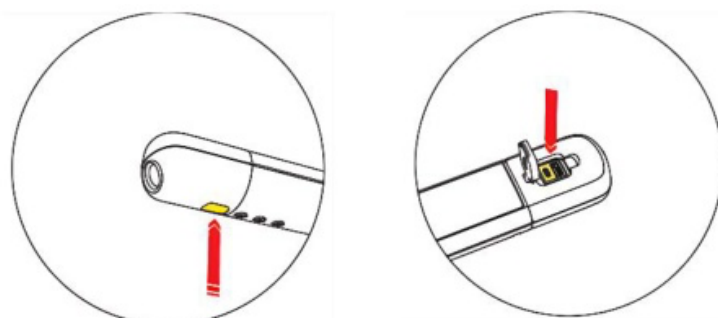

Push-Modus


✓ Push-Modus aktivieren

"↑" + "↓" gleichzeitig drücken



i Push-Modus deaktivieren

Joystick bewegen zum Ausschalten

Gleichzeitig
drücken

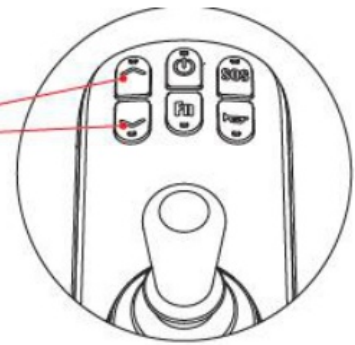

Laden

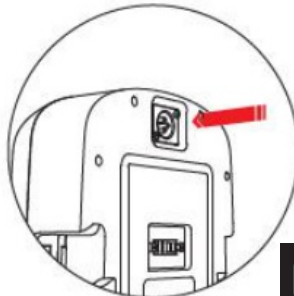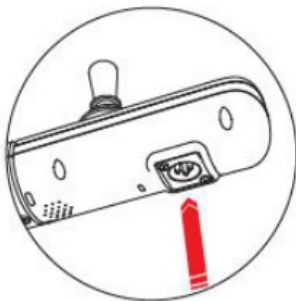


- "CHARGING" - Ladevorgang aktiv
- "FULL CHARGED" - Batterie vollständig geladen

i Lademöglichkeiten

- An der Armlehne laden
- Direkt an der Batterie laden

i Ladeanzeige

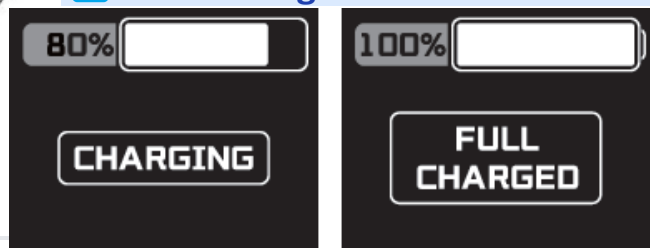



Im stromlosen Modus

⚠ Bremse aktivieren

Hebel auf beiden Seiten der Motoren anheben, um die Bremse zu aktivieren

✓ Bremse lösen

Hebel auf beiden Seiten der Motoren nach unten treten, um die Bremse zu lösen

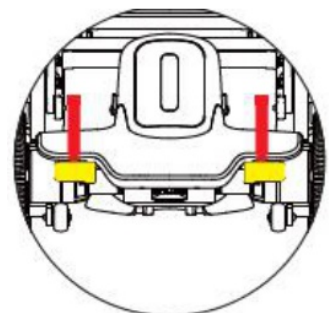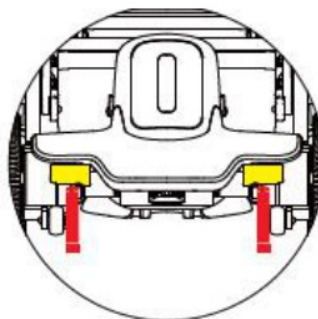

Für Ihre Sicherheit und optimale Nutzung Ihres Elektrorollstuhls.