




## F6

Attends F6 sind anatomisch geformte Vorlagen, speziell entwickelt für Stuhlinkontinenz. Sie werden mit Fixierhosen (Attends Stretch Pants oder Attends Stretch Pants Comfort) getragen.



**Anatomisch geformt** für einen anliegenden und bequemen Sitz.

**Durchgehende Auslaufsperrn** aus wasserabweisendem Material gegen Auslaufen, vor allem beim Liegen auf der Seite.

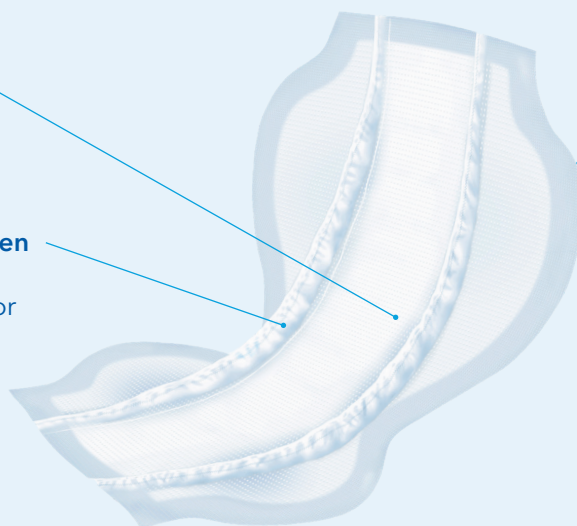

**Flüssigkeitsundurchlässige glatte Aussenseite** - einfach anzulegen und schützt vor Auslaufen.

**Produktname** auf der Rückseite aufgedruckt - gut lesbar in Blau.



**Hautverträglichkeit** bestätigt von SGS proderm GmbH, Institut für dermatologische Forschung und Prüfung. Getestet im Auftrag von Attends

| <br><b>Attends F6</b>               | <b>Stückzahl<br/>Packing<br/>Karton</b> | <b>GTIN (7332152)<br/>Packing<br/>Karton</b> | <b>Länge x Breite im Schritt<br/>in cm</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>bei reiner Stuhlinkontinenz</b> | 40<br>4 x 40                            | 205181<br>205198                             | 58 x 17,5                                  |

**Saugkern**  
Zellstoff mit Aufnahmeschicht

**Rückseite**  
Polyethylenschicht

**Hautnahe Innenschicht**  
Vlies

**Latexfrei**



Bei Attends übernehmen wir Verantwortung für den Einzelnen, für die Gesellschaft und für unsere Erde.



Für die Herstellung der Produkte werden erneuerbare Energien eingesetzt und zertifizierte Projekte zur Emissionsreduzierung gefördert.



Die Produkte tragen das anerkannte Nordic Swan Ökolabel.



Die Verpackungen enthalten mindestens 30% recycelten Kunststoff.




Das Holz für unseren Zellstoff stammt aus kontrolliert nachhaltiger Forstwirtschaft.




Die Produkte sind zertifiziert und damit streng schadstoffgeprüft.

# Anlegehinweise


Für einen optimalen Halt empfiehlt es sich, die Attends F6 mit Fixierhosen (Attends Stretch Pants oder Attends Stretch Pants Comfort) zu tragen.

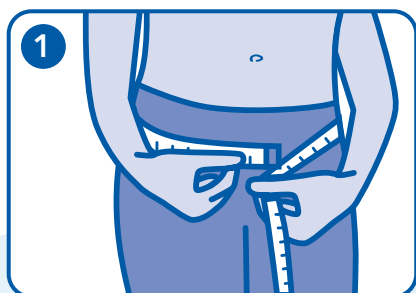


Messen Sie den Bauch- und Hüftumfang und nehmen Sie den grösseren der beiden Werte, um die richtige Grösse der Fixierhose zu bestimmen.

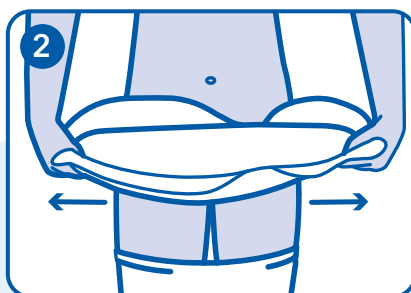


Ziehen Sie die Fixierhose bis übers Knie hoch. Formen Sie die Vorlage in Längsrichtung zu einem Schiffchen. Achten Sie darauf, dass sich die Auslaufsperrn aufrichten.

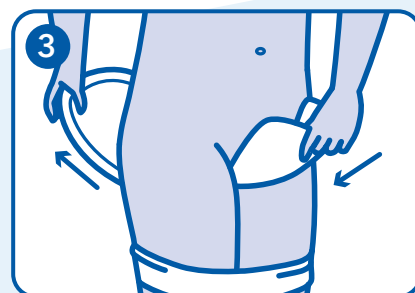


Führen Sie das Produkt von vorne nach hinten zwischen den Beinen durch - dabei kommt der kleinere Teil nach vorne und der grössere Teil nach hinten ans Gesäss.

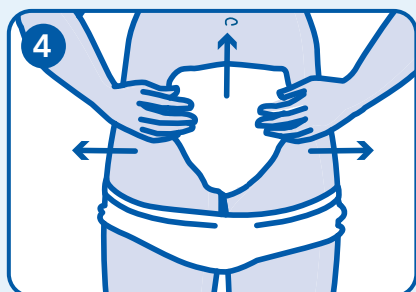

Streichen Sie das Produkt glatt und ziehen Sie die Fixierhose nach oben, bis sie richtig sitzt.

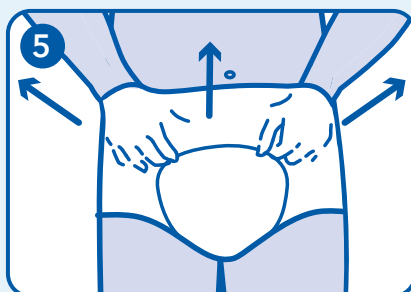

Korrigieren Sie nochmals den Sitz der Vorlage und achten Sie darauf, dass nichts nach innen eingeklappt ist.

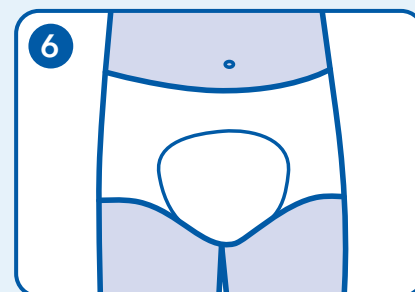

Die Fixierhose sollte die Vorlage komplett bedecken. Prüfen Sie nochmals, ob alles richtig und faltenfrei sitzt.

## Tipps und Hinweise

- Wählen Sie die richtige Grösse der Fixierhose entsprechend Ihres Bauch- oder Hüftumfangs. Nehmen Sie dabei den grösseren der beiden Werte.
- Falten Sie die Vorlage zunächst vollständig auseinander.
- Formen Sie das Produkt in Längsrichtung zu einem Schiffchen.
- Platzieren Sie das kleinere Ende der Vorlage vorne und das grössere Ende hinten am Gesäss.
- Wenn das Produkt noch sauber und trocken ist, kann es nach dem Toilettengang erneut angelegt werden.
- Gebrauchte Produkte immer von vorne nach hinten ausziehen, um Keimverschleppung zu vermeiden.

## Entsorgung

- Rollen Sie das ausgelastete und/oder verschmutzte Produkt zusammen und entsorgen Sie es im Restmüll.
- Bitte auf keinen Fall über die Toilette entsorgen: Verstopfungsgefahr. Inkontinenzprodukte gehören nicht in den Verpackungsmüll und nicht in den Biomüll, sondern in den Restmüll.
- **Attends Stretch Pants** Fixierhosen sind **waschbar** und wiederverwendbar.

Weitere Informationen auf [www.attends.ch](http://www.attends.ch)