

Attends®

La protection incontinence pour vous




F6

Attends F6 sont des protections anatomiques spécialement conçues pour gérer l'incontinence fécale. Elles sont à utiliser avec des sous-vêtements de maintien (Attends Stretch Pants ou Attends Stretch Pants Comfort).



Forme anatomique pour un meilleur confort.

Barrières latérales en tissu déperlant **sur toute la longueur** pour prévenir le risque de fuites, spécialement en position allongé sur le côté.

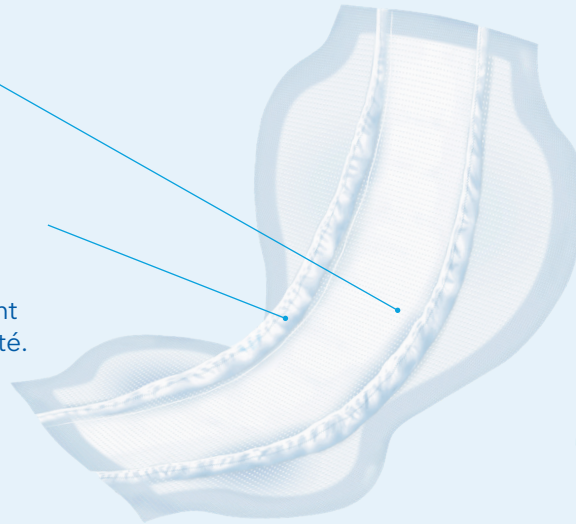



Voile extérieur lisse et imperméable - facile à mettre en place et protège contre les fuites.

Nom du produit imprimé au dos de la protection dans une couleur bleue facilement lisible.



Tolérance cutanée approuvée dermatologiquement par SGS proderm GmbH, institut de recherche dermatologique. Testé pour le compte de Attends

|  Attends F6 | Quantité Sac Carton | GTIN (7332152) Sac Carton | Longueur x Largeur à l'entrejambe en cm |
|---|----------------------------------|--|---|
|  en cas d'incontinence fécale | 40 4 x 40 | 205181 205198 | 58 x 17,5 |

Noyau Absorbant
Cellulose avec couche d'acquisition

Voile Extérieur
Couche de polyéthylène

Voile Supérieur
Non-tissé

Sans latex



Chez Attends, nous prenons soin des personnes, de notre communauté et de la planète.



Produits fabriqués avec des énergies renouvelables et soutien à des projets vérifiés de réduction des émissions.



Ces produits ont obtenu la certification écologique renommée Nordic Swan.



Emballages plastiques fabriqués avec au minimum 30% de matériaux recyclés.




La cellulose de ces produits provient de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.




Ce label vous certifie que ces produits sont inoffensifs pour la santé humaine.

Conseils de pose


Afin d'obtenir les meilleurs résultats nous recommandons d'utiliser les sous-vêtements de maintien (Attends Stretch Pants ou Attends Stretch Pants Comfort) avec les protections Attends F6

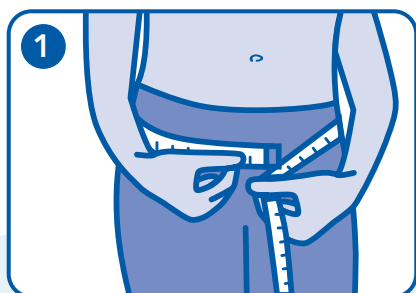


Mesurez les tours de hanches et de taille et sélectionnez la mesure la plus grande des deux afin de choisir la bonne taille de sous-vêtement de maintien.

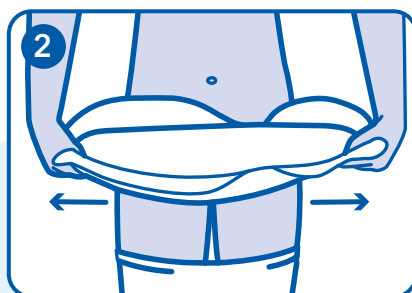


Enfilez le sous-vêtement jusqu'au dessus des genoux. Pliez légèrement la protection dans la longueur et formez un creux pour faire remonter les barrières latérales.

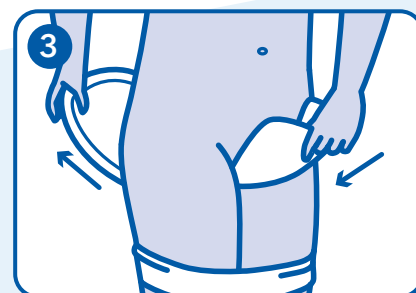


Placez la protection entre les cuisses de l'avant vers l'arrière - avec la partie la moins large à l'avant et la plus large à l'arrière.

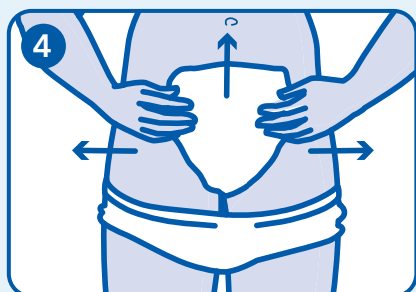

Dépliez bien la protection de tous les côtés et remontez le sous-vêtement de maintien vers le haut jusqu'à l'aîne afin d'assurer un ajustement optimal.

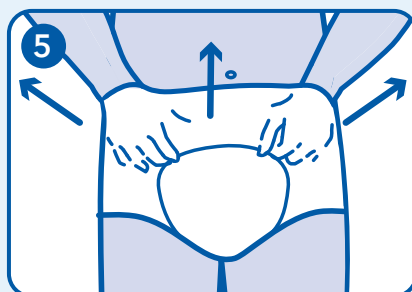

Ajustez le sous-vêtement de maintien pour qu'il recouvre toute la protection et assurez-vous que le voile extérieur n'est pas replié vers l'intérieur.

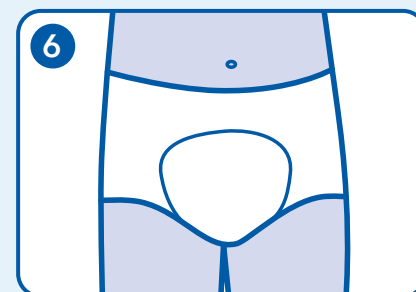

Une fois que le sous-vêtement de maintien recouvre la totalité de la protection, vérifiez que les deux sont bien étroitement ajustés.

Conseils et astuces

- Choisissez la bonne taille de sous-vêtement de maintien en mesurant les tours de hanches et de taille et en prenant en considération le plus large des deux.
- Vérifiez que vous avez totalement déplié la protection avant l'application.
- Pliez doucement la protection dans la longueur et formez un creux.
- Placez la partie la moins large de la protection à l'avant et la partie la plus large à l'arrière du corps.
- Une protection propre et sèche peut être réutilisée après la toilette.
- Retirez les protections souillées toujours de l'avant vers l'arrière pour éviter la propagation des germes.

Gestion du produit usagé

- Roulez la protection sur elle-même et jetez-la conformément au protocole de gestion des déchets de votre établissement.
- Ne jetez jamais la protection dans les toilettes.
- Les sous-vêtements de maintien **Attends Stretch Pants** sont lavables et réutilisables.