



## Istruzioni per l'uso

### **Nome**

Traversa per incontinenza riutilizzabile

### **Modello**

40x50cm, 45x45cm, 45x60cm, 50x50cm, 50x60cm, 51x56cm, 53x56cm, 45x61cm, 75x90cm, 76x86cm, 80x90cm, 85x90cm, 85x135cm, 86x91cm, 86x132cm, 86x138cm, 86x96cm, 90x132cm, 90x140cm, 90x120cm, 90x150cm, 90x180cm, 91x91cm, 91x138cm, 91x142cm, 91x152cm, 91x182cm, 100x140cm, 110x130cm, 111x132cm Tutte le misure possono essere prodotte con o senza alette/tasche laterali.

### **Descrizione del dispositivo**

Protezione tessile multistrato in materiale assorbente [ad es. poliestere + poliestere non tessuto con viscosa + poliestere con PU/PVC, o poliestere + poliestere non tessuto con viscosa + poliestere con PU/PVC + tessuto cotone/poliestere, o poliestere + imbottitura + poliestere non tessuto con viscosa + poliestere con PU]. La traversa viene posizionata su una superficie (ad es. materasso, sedia, divano) e sotto il paziente per assorbire fluidi corporei derivanti da procedure chirurgiche, parto e/o incontinenza. Il prodotto non contiene agenti antimicrobici ed è destinato all'uso in strutture sanitarie e a domicilio.

### **Destinazione d'uso**

Questo prodotto è destinato all'uso in abitazioni private, ospedali e case di cura per proteggere le persone anziane e i pazienti incontinenti dall'infiltrazione di urina o altri fluidi corporei in letti, divani, sedie o altre superfici, e per proteggere la superficie sottostante dall'umidità.

### **Aspetto e componenti**

Realizzato in tessuto a maglia catena, poliestere non tessuto, poliestere di imbottitura e composito TPU/PVC o cucito. Fornito non sterile.

### **Modalità d'uso**

1. Leggere attentamente l'etichetta e le istruzioni per l'uso prima dell'utilizzo.
2. Rimuovere l'imballaggio. Non utilizzare il prodotto se l'imballaggio è danneggiato o il prodotto è scaduto.

3. Posizionare la traversa per incontinenza sul letto, sulla sedia, sul divano o su altre superfici da proteggere e isolare.

### Precauzioni e avvertenze

1. Questo prodotto è riutilizzabile. Si prega di sostituirlo tempestivamente con un prodotto pulito.
2. Questo prodotto non è sterilizzato e non è fornito in modo asettico.
3. Non utilizzare con coperte elettriche e altri apparecchi riscaldanti.
4. Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone anziane per evitare l'ingestione accidentale.

### Controindicazioni

Non utilizzare in caso di allergia al tessuto a maglia catena.

### Conservazione

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.

### Istruzioni per il lavaggio

1. Lavare senza ammorbidente prima del primo utilizzo.
2. Temperatura di lavaggio < 95°C.
3. Asciugare in asciugatrice a bassa temperatura.
4. Non lavare a secco / Non candeggiare / Non stirare / Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia.
5. Non asciugare a vapore né a pressa.

### Durata di conservazione

5 anni

### Smaltimento

Smaltire il prodotto in conformità alle normative locali.

### Etichette, simboli di imballaggio

| Simbolo                                                                             | Spiegazione                      | Simbolo                                                                             | Spiegazione                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Marcatura CE                     |  | Dispositivo medico                 |
|  | Nome e indirizzo del fabbricante |  | Rappresentante autorizzato nell'UE |

|                                                                                   |                                       |                                                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Data di fabbricazione                 |  | Utilizzabile fino a (data di scadenza)        |
|  | Codice lotto                          |  | Non riutilizzare / Monouso                    |
|  | Avvertenze e precauzioni              |  | Non sterile                                   |
|  | Consultare le istruzioni per l'uso    |  | Non utilizzare se la confezione è danneggiata |
|  | Identificazione unica del dispositivo |  | Paese di fabbricazione                        |
|  | Importatore                           |  | Distributore                                  |
|  | Numero di modello                     |  | Mandatario svizzero                           |

## Fabbricante



**Azienda:** Changzhou Newrise Medical & Hygiene Products Co., Ltd  
**Indirizzo:** No. 39 Chuangye Road, Zhulin Town, Jintan District,  
Changzhou City, Jiangsu, China 213241

## Rappresentante autorizzato nell'UE (EU REP)



**Azienda:** SUNGO Europe B.V.  
**Indirizzo:** Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands

## Mandatario svizzero (CH REP)



**Azienda:** Sana Swiss Services AG  
**Indirizzo:** Niedermattstrasse 8c, 4528 Zuchwil, Switzerland