



## Notice d'utilisation

### **Nom**

Alèse d'incontinence réutilisable

### **Modèle**

40x50cm, 45x45cm, 45x60cm, 50x50cm, 50x60cm, 51x56cm, 53x56cm, 45x61cm, 75x90cm, 76x86cm, 80x90cm, 85x90cm, 85x135cm, 86x91cm, 86x132cm, 86x138cm, 86x96cm, 90x132cm, 90x140cm, 90x120cm, 90x150cm, 90x180cm, 91x91cm, 91x138cm, 91x142cm, 91x152cm, 91x182cm, 100x140cm, 110x130cm, 111x132cm Toutes les tailles peuvent être fabriquées avec ou sans rabats/ailes.

### **Description du dispositif**

Pièce plate en matériau textile absorbant [p. ex. polyester + polyester non tissé avec viscose + polyester avec PU/PVC, ou polyester + polyester non tissé avec viscose + polyester avec PU/PVC + tissu coton/polyester, ou polyester + rembourrage + polyester non tissé avec viscose + polyester avec PU] destinée à être placée sur une surface (p. ex. matelas, chaise, canapé) et sous un patient pour absorber les fluides corporels résultant d'interventions chirurgicales, d'accouchements et/ou d'incontinence. Le produit ne contient pas d'agent(s) antimicrobien(s). Il est destiné à être utilisé dans les établissements de santé et à domicile.

### **Utilisation prévue**

Ce produit est destiné à être utilisé dans les domiciles, les hôpitaux et les maisons de retraite pour protéger les personnes âgées et les patients incontinents contre l'infiltration d'urine ou d'autres fluides corporels dans les lits, canapés, chaises ou autres zones, et de protéger la surface sous-jacente contre l'humidité.

### **Apparence et composants**

Fabriqués en tricot chaîne, polyester non tissé, polyester de rembourrage et composite TPU/PVC ou cousus. Fournis non stériles.

### **Mode d'emploi**

1. Lire attentivement l'étiquette et la notice d'utilisation avant l'emploi.
2. Retirer l'emballage. Ne pas utiliser le produit si l'emballage est endommagé ou si le produit est périmé.

3. Placer l'alèse d'incontinence sur le lit, la chaise, le canapé ou toute autre surface nécessitant protection et isolation.

### Précautions et avertissements

1. Ce produit est réutilisable. Veuillez le remplacer en temps voulu par un produit propre.
2. Ce produit n'est pas stérilisé et n'est pas fourni de manière aseptique.
3. Ne pas utiliser avec des couvertures chauffantes et autres appareils de chauffage.
4. Veuillez conserver le produit hors de la portée des enfants et des personnes âgées afin d'éviter toute ingestion accidentelle.

### Contre-indications

Ne pas utiliser en cas d'allergie au tricot chaîne.

### Conservation

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.

### Instructions de nettoyage

1. Laver sans adoucissant avant la première utilisation.
2. Température de lavage < 95°C.
3. Sécher en machine à basse température.
4. Ne pas nettoyer à sec / Ne pas javelliser / Ne pas repasser / Ne pas utiliser de produits chimiques de nettoyage.
5. Ne pas sécher à la vapeur ni à la presse.


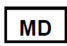

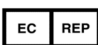
### Durée de conservation















5 ans

### Élimination

Veuillez éliminer le produit conformément aux réglementations locales.

### Étiquettes, symboles d'emballage

Symbole	Explication	Symbole	Explication
	Marquage CE		Dispositif médical
	Nom et adresse du fabricant		Représentant autorisé dans l'UE

	Date de fabrication		Utilisable jusqu'à (date de péremption)
	Code de lot		Ne pas réutiliser / Usage unique
	Avertissements et précautions		Non stérile
	Consulter la notice d'utilisation		Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Identification unique du dispositif		Pays de fabrication
	Importateur		Distributeur
	Numéro de modèle		Mandataire suisse

## Fabricant



**Société** : Changzhou Newrise Medical & Hygiene Products Co., Ltd  
**Adresse** : No. 39 Chuangye Road, Zhulin Town, Jintan District,  
Changzhou City, Jiangsu, China 213241

## Représentant autorisé dans l'UE (EU REP)



**Société** : SUNGO Europe B.V.  
**Adresse** : Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands

## Mandataire suisse (CH REP)



**Société** : Sana Swiss Services AG  
**Adresse** : Niedermattstrasse 8c, 4528 Zuchwil, Switzerland